


# Hycellvator

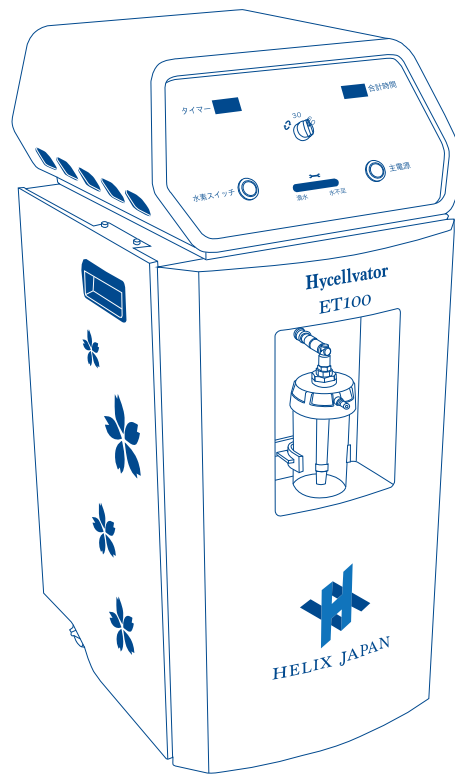

## ET100

### 取扱説明書

#### 目次

---

##### お使いになる前に

- 注意事項／故障かな?と思ったら …… P1
- 付属品一覧 …… P2

##### 使い方

- ET100各部名称 …… P3
- ET100をセットしてみましょう …… P4
- ET100を動かしてみましょう …… P5
- 専用水・メンテナンスについて …… P6

##### 製品仕様

- 製品仕様 …… P7
- 免責事項 …… P7

## まずはこんな点にご注意ください

- 機械は壁と10cm以上間隔を開けて設置してください。
- まれにガス警報機が反応することがございますので、換気をしながらご利用ください。
- 機械は火気厳禁です。火の元ではご使用しないでください。

### 電源が入らない

- 専用の電源コード、延長コードを使っていますか？
- 専用の電源コード、延長コードはコンセントにしっかりと差し込まれていますか？
- 電源スイッチは長押ししましたか？

### 電源は入ったが、動かない

- 水素スイッチを長押ししましたか？  
※電源スイッチだけでは動きません。
- 専用水の不足ランプ (P6) が点灯していませんか？
- 専用水の満水ランプ (P6) が点灯していませんか？  
※すぐに弊社へご連絡ください。
- メンテナンスランプ (P6) が点灯していませんか？

### 水素が出ない／出る量が少ない

- 湿潤カップのフタはしっかりと締まっていますか？
- 専用水注水口 (P3) のフタはしっかりと締まっていますか？
- 専用水注水口 (P3) のフタの内側のゴムは外れていませんか？
- チューブはすべてつながっていますか？
- タコ足配線にしていますか？
- 使用時間が1,000時間に達していませんか？

### 途中で電源が切れる

- 運転中に機械を斜めにすると安全装置が作動し、電源が切れることがあります。
- 電源コードが抜けかかったり、接触不良になったりしていませんか？

### 水素が出ているかわからない

- 水素は無味無臭ですが、湿潤カップ内にブクブクと気泡が出ていれば、水素は発生しています。鼻カニューラの先を口元にあてて頂くと微風を感じます。

#### メンテナンスや機器の操作などのご相談はこちらから

使用時間が900時間に達しますと、メンテナンスランプが点灯し、1,000時間に達しますと水素が発生しなくなります。使用時間900時間又は1年に1度を目安に弊社へご連絡ください。

株式会社ヘリックスジャパン メンテナンスセンター (平日 9:00-17:00)




TEL 03-5579-2066



m-info@helixj.com

# 付属品一覧

イラストは実際とは形状が異なる場合があります

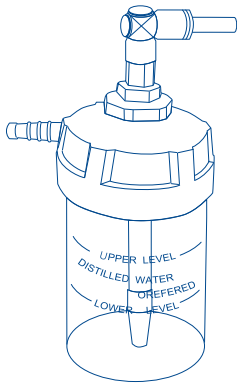


## 湿潤カップ

ミネラルウォーターを入れ、水素・酸素を保湿します。




## 専用水

水素・酸素を発生させるための高純度精製水です。

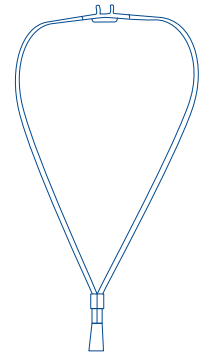


## 鼻カニューラ

鼻に挿し、水素・酸素を吸入します。

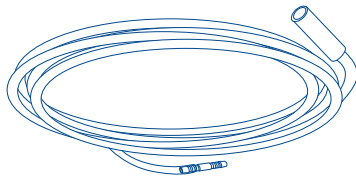


## 延長チューブ

湿潤カップと鼻カニューラを接続します。

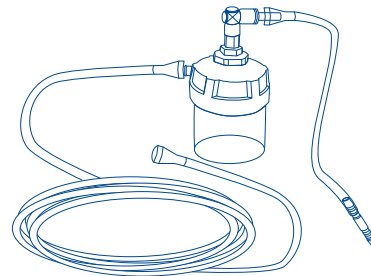


## 集水ケース

連続運転時にチューブに溜まりやすい水滴を集めます。

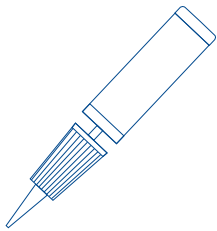


## 水滴排出ポンプ


チューブに溜まった水滴を排出します。

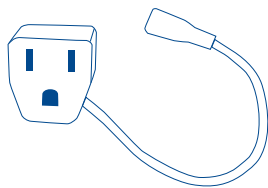

## アース付プラグ

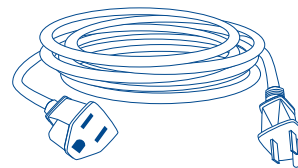


## 延長用電源コード

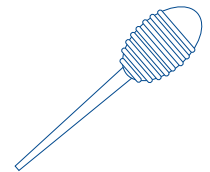

## 専用水吸出スポイト

満水ランプ (P6) が点灯したときに使用します。

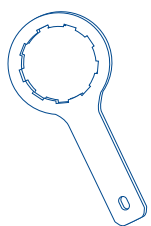

## キャップレンチ

専用水注水口 (P3) を開閉します。






## マグネットフック



## 取扱説明書

# ET100各部名称

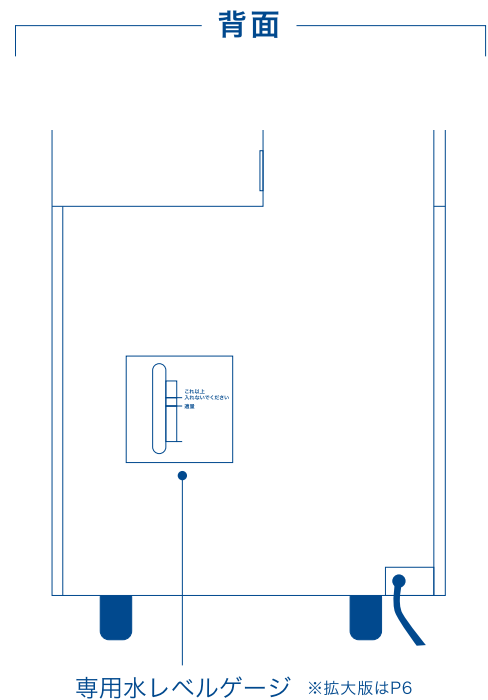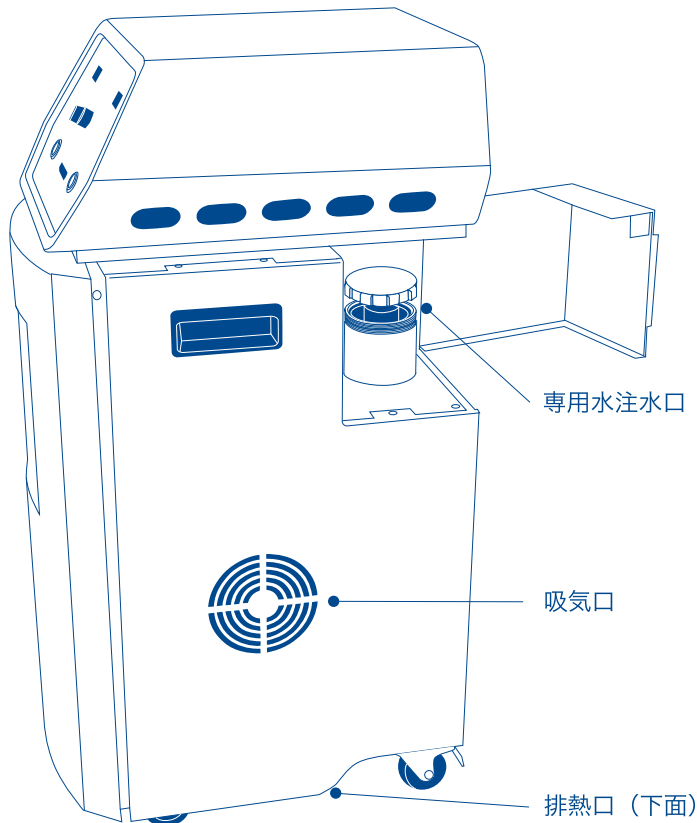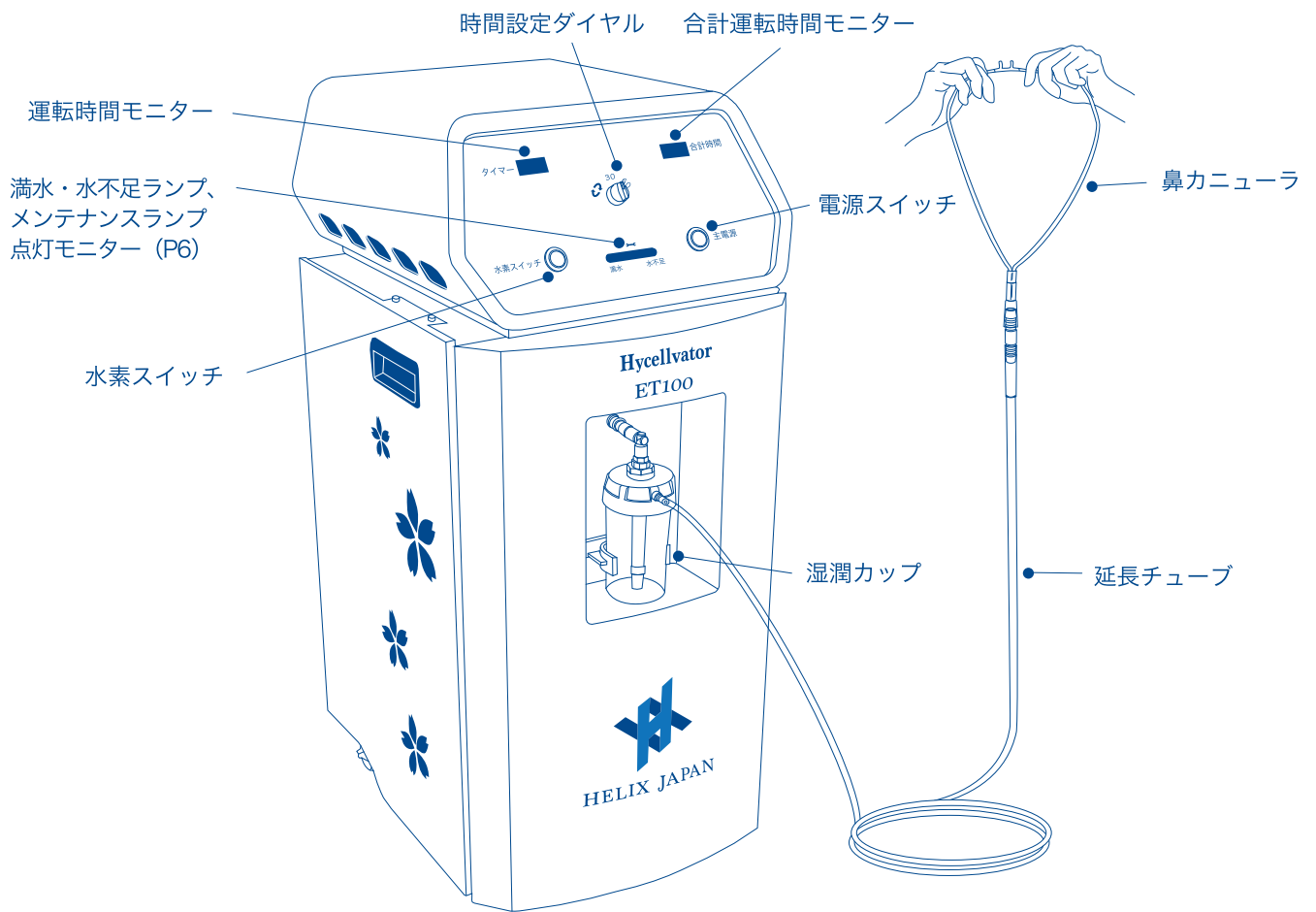


こちらのQRコードから  
 動画にて使用方法を  
 ご覧いただけます。▶



# ET100をセットしてみましよう

## 電源を入れる前の準備

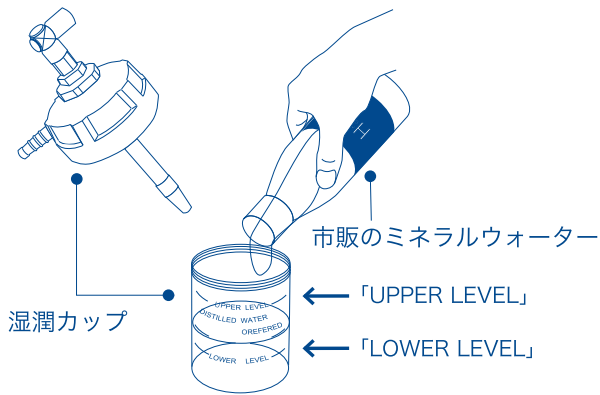


- 1 湿潤カップに市販のミネラルウォーター(軟水)を入れます。

※浄水器付であれば水道水でも可


※ミネラルウォーターの水位は「UPPER LEVEL」と「LOWER LEVEL」の間になるようにしてください。

※水を入れ終わったら湿潤カップのフタはしっかり締めてください。

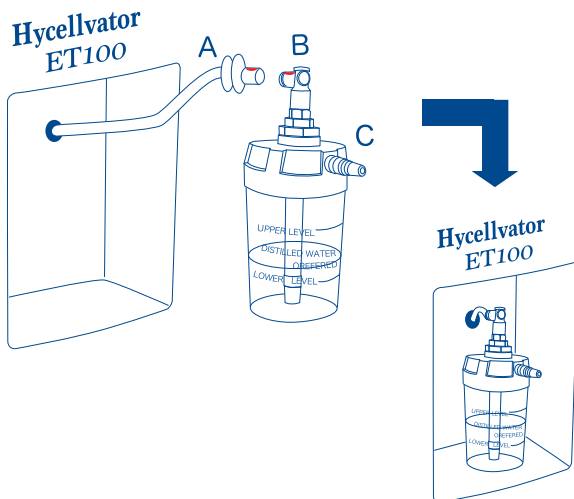


- 2 AとBを接続して、湿潤カップをセットしてください。

※赤いシールと赤いシールを合わせてください。

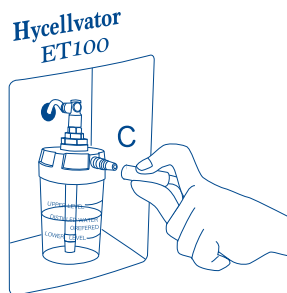

- 3 Cと延長チューブを接続します。


※引っぱって抜けない程度を目安に差し込んでください。

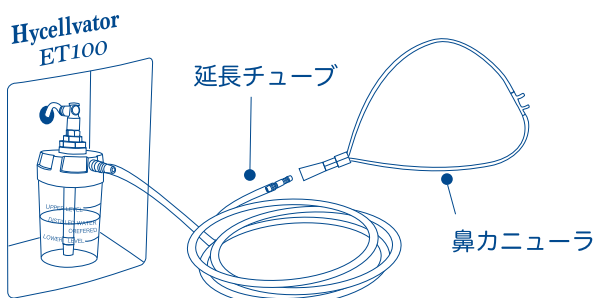

- 4 延長チューブと鼻カニューラを接続します。

# ET100を動かしてみよう

## 水素を発生させてみましょう

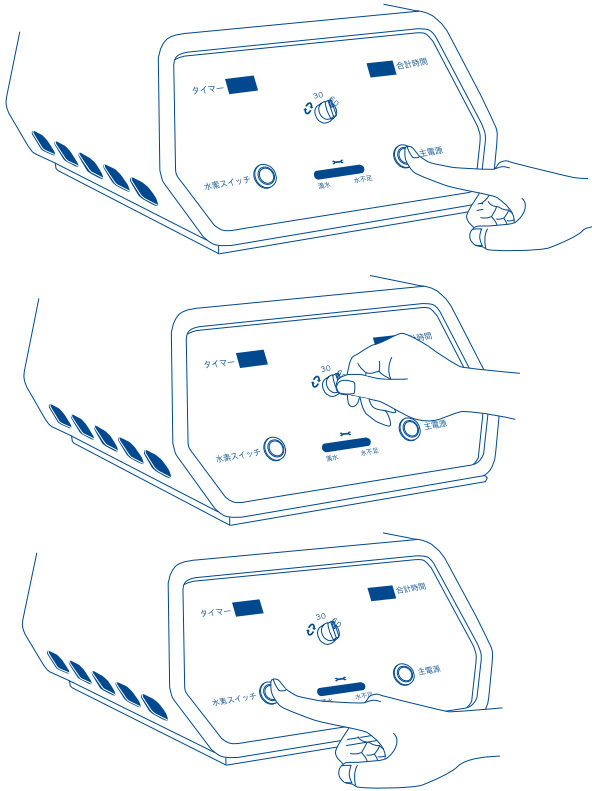

**1** 電源スイッチを青いランプが点灯するまで長押しします。

**2** 運転モードを選択します。


**連続運転** 30分の水素発生と2分間の冷却運転を繰り返します。

**30or60分運転** 30or60分の水素発生と2分間の冷却運転を行い、3～5分後に自動で電源が切れます。

**3** 水素スイッチを長押し、水素を発生させます。

※水素ガスが発生すると湿潤カップに気泡が出ます。

## 途中で吸入を終了したいときは

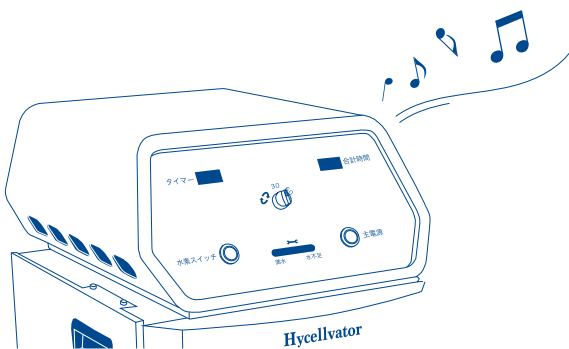


**連続運転** 水素スイッチを押してください。2分間の冷却が始まり、3～5分後に電源が切れます。

**30or60分運転** 30or60分の水素発生と2分間の冷却運転のあと、メロディが流れ3～5分後に自動で電源が切れるので、**どのスイッチも押さず、水素は出しっぱなしにしてください。**

※水素発生中や冷却中に電源スイッチを押して強制終了すると、故障の原因になりますのでご注意ください。

## 使用後のお手入れ

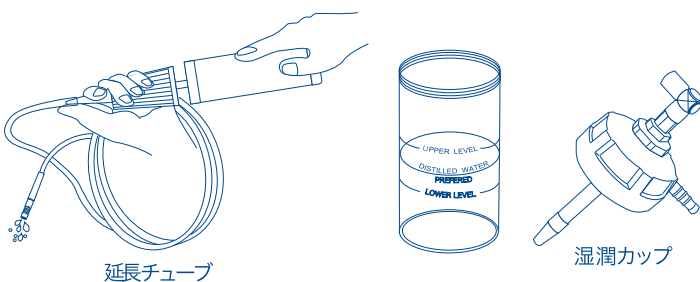

延長チューブ

湿潤カップ




**延長チューブ** 水滴が溜まったら、専用の水滴排出ポンプで、水滴を排出してください。

**湿潤カップ** 1日の使用が終了した際に中の水を捨て軽く水洗いしてください。

※水の交換は1日1回で大丈夫です。

# 専用水・メンテナンスについて

## 専用水を補給します

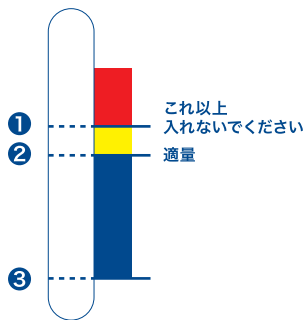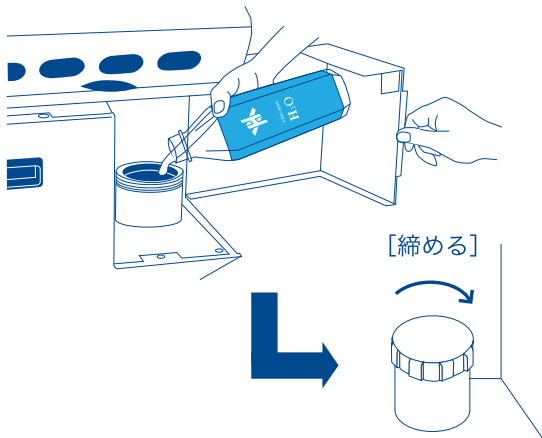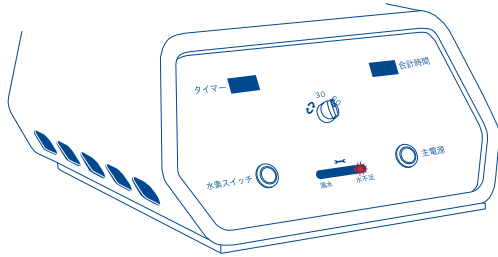

**1** 水不足ランプが赤く点灯したら、電源をオフにした上、専用水を補給します。


**2** 右背面の扉を開け、1本分の専用水をゆっくりと注ぎ入れてください。注ぎ終わったらフタをしっかりと締めてください。

※フタがしっかり締まっていない場合は、水素が発生しないことがあります。

**3** 背面専用水レベルゲージで水位の確認ができます。

<b>①</b> 1番上の線	専用水を入れすぎています。この線を上回ると満水ランプが点灯します。※弊社までご連絡ください。
<b>②</b> 中央の線	1本分の専用水が入っています。
<b>③</b> 1番下の線	専用水が不足しています。この線を下回ると水不足ランプが点灯します。


## 満水ランプ・メンテナンスランプが点灯したら

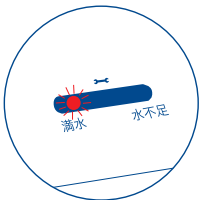

### 満水ランプが赤く点灯した場合

必ず弊社へご連絡ください。

※水不足ランプが点灯していない時に給水すると、満水ランプが点灯しますのでご注意ください。

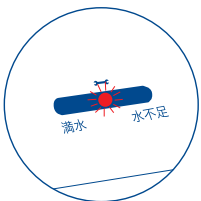

### メンテナンスランプが赤く点灯した場合

使用時間が900時間に達しますと、メンテナンスランプが点灯し、1,000時間に達しますと水素が発生しなくなります。使用時間900時間又は1年に1度を目安に弊社へご連絡ください。

# 製品仕様

ハイセルベーター <b>Hycellvator ET100</b>	電源	100V
	消費電力	700W
	ガス発生方式	電気分解方式
	水素酸素ガス発生量	水素 約1,200ml/m 酸素 約600ml/m
	水素純度	99.99%
	寸法/重量	W360×D425×H800mm / 約39kg
	運転モード	30分/60分/連続運転
	連続運転モード	30分毎2分休止の自動連続運転
	主電源Auto Off 機能付き	設定時間終了:3~5分後 自動で電源OFF
	メンテナンス	1年または1,000時間毎

## 免責事項

保証期間内でありましても、以下の場合は有償修理(保証対象外)となります。

- ①お客様による不適切な使用方法・条件による故障
- ②お客様の不注意や過失に起因する故障
- ③お客様の無断改造に起因する故障
- ④お客様が弊社以外のところで修理や改良をした場合の故障
- ⑤お客様が弊社指定の専用水および付属品を使用しないで発生した機器の不具合や故障
- ⑥お客様が下記に規定するメンテナンスを受けずに起きた故障
- ⑦保証書の提示がなかった場合
- ⑧火災等の不可抗力、地震、風水害等の天変地異による故障

### メンテナンス 規定

お客様は本物品の使用時間が1,000時間に達した場合、または1年に1回弊社が実施するメンテナンスに応じるものとします。  
3ヶ月以上未使用時も同様にメンテナンスに応じるものとします。  
**<メンテナンス費用> 1回あたり35,000円(税別)**

保証期間中にお客様が弊社の示す方法で使用していたにも拘わらず発生した故障の場合は、無償で故障部分の交換もしくは修理を行う、または代替品と交換します。

## 保証期間

納品日翌日から3年間

## 廃棄時にご注意願います

リサイクル法ではお客様がご使用済みの機械を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象商品を販売店や市町村に引き渡すことが求められています。

QRコードより「添文ナビアプリ」をダウンロードしていただくと、湿潤カップ側面に貼付しているQRコードより湿潤カップについての添付文書をご覧いただけます。



アンドロイド版



iOS版

メンテナンスや機器の操作などのご相談はこちらから



株式会社ヘリックスジャパン

株式会社ヘリックスジャパン メンテナンスセンター (平日 9:00-17:00)



TEL 03-5579-2066



m-info@helixj.com